



نام دستگاه: سانتریفیوژ میکروهماتوکریت

مدل دستگاه: (NT715)HAWKSLEY

شرکت سازنده: طب آزمون

#### طریقه استفاده:

۱. لوله میکروهماتوکریت را با خون تام حاوی ضد انعقاد پر نمایید.
۲. انتهای لوله را کاملاً با خمیر مخصوص پر کنید.
۳. لوله را در شیار تعبیه شده دارای شماره طوری قرار دهید که انتهای حاوی خمیر به سمت خارج صفحه دوار باشد.
۴. حداکثر ظرفیت ۲۴ لوله است که نیاز به تعادل بین لوله ها نیست .
۵. درب سانتریفیوژ را محکم بسته و دستگاه را روشن نمایید .
۶. زمان سنج خودکار را در زمان ۵ دقیقه قرار دهید.
۷. بعد از توقف کامل آن را باز کرده و لوله را بردارید.

#### طریقه نگهداری:

۱. برای کار بهتر نظافت دستگاه توصیه میشود.
۲. هنگام روشن بودن دستگاه از جابه جا کردن آن جدا خودداری فرمایید.
۳. در هنگام استفاده از بسته بودن کامل درب اطمینان حاصل فرمایید. هرگز در هنگام باز بودن درب دستگاه آن را روشن نکنید.
۴. هرگز قبل از توقف کامل دستگاه درب آن را باز نکنید.
۵. بهتر است بلافاصله درصد گویچه های قرمز خون را توسط خط کش میکروهماتوکریت اندازه گیری نموده و ثبت نمایید.

۶. در صورتی که ثبت لوله ها بلافاصله انجام نشد لوله ها را در این مدت در حالت عمودی قرار دهید تا از به هم خوردن سطح جداکننده پلازما و گویچه ها جلوگیری به عمل آید.